

ARTROMOT K1

Ersatzteile

Leben in Bewegung – den Patienten zuliebe




ARTROMOT K1-Rev8


Leben in Bewegung – den Patienten zuliebe



S/N 1000 - 19999

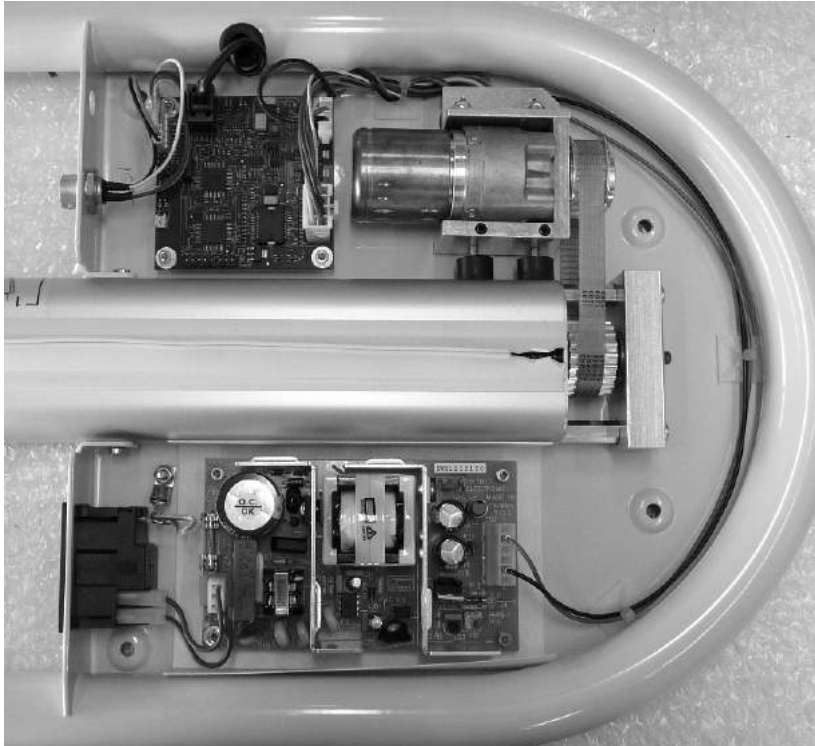


S/N >20000

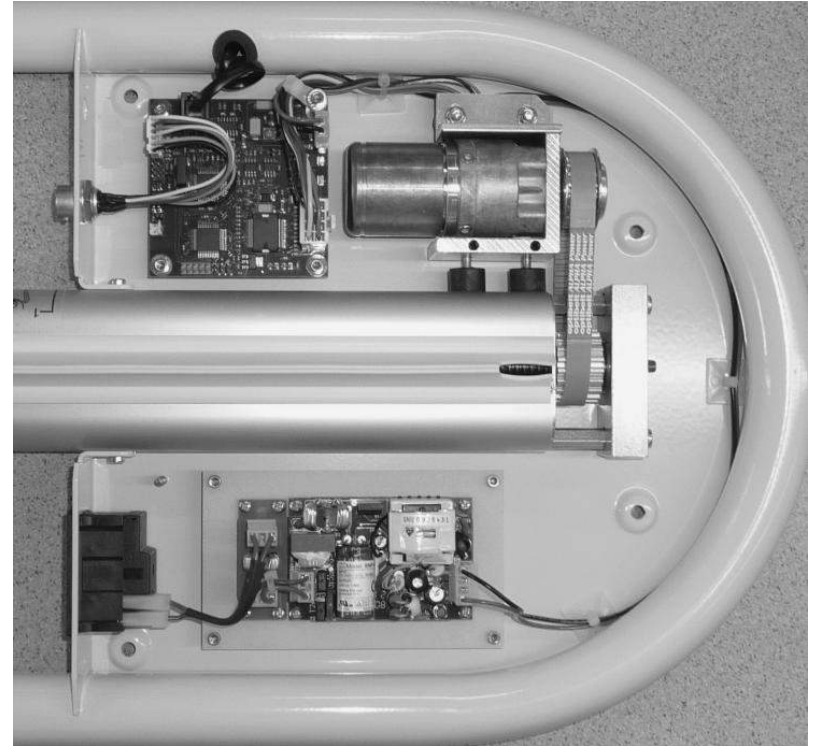

0.0037.200

2.0037.111

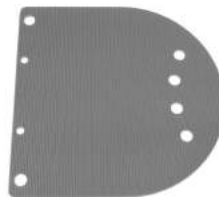

DIN7985M5X12A2

0.0037.115



ARTROMOT K1-Rev8

SERIAL NUMBER < 6000





0.0037.075




SERIAL NUMBER > 6000




0.0037.220

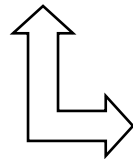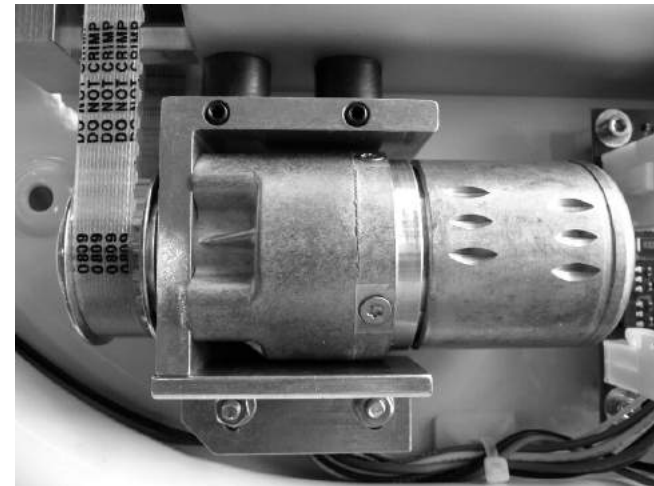

0.0037.012

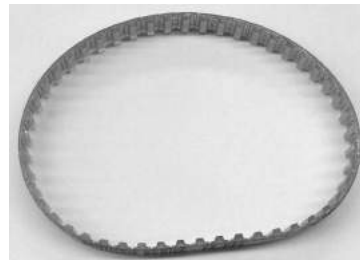

ARTROMOT K1-Rev8

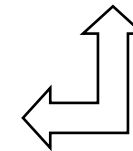

0.0037.105



0.0037.222



SERIAL NUMBER < 6000




2.0037.901

SERIAL NUMBER > 6000



2.0037.921

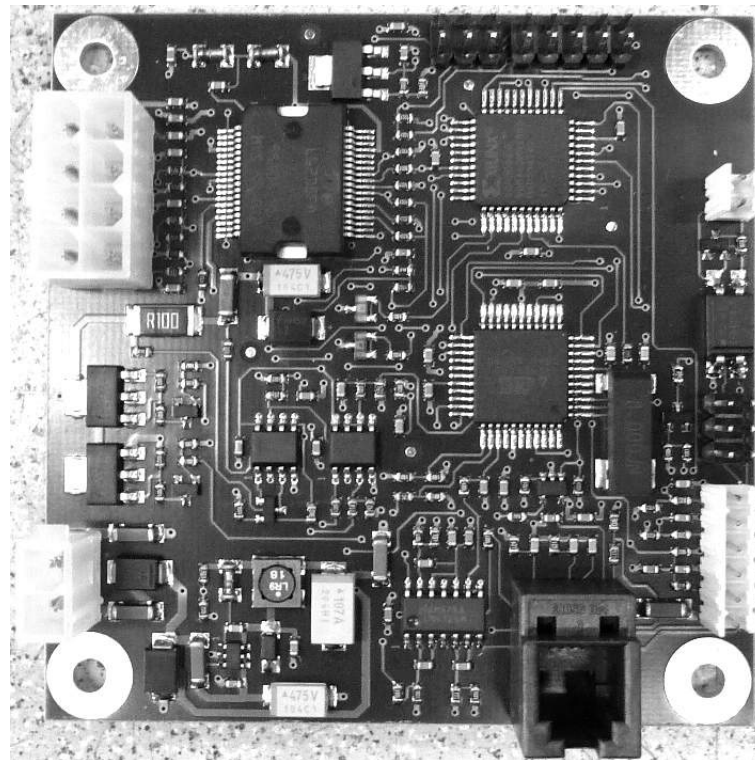

S/N 1000 - 19999

0.0034.246



↑
0.0000.005

0.0034.245




2.0034.358



↑
2.0034.359

0.0034.244

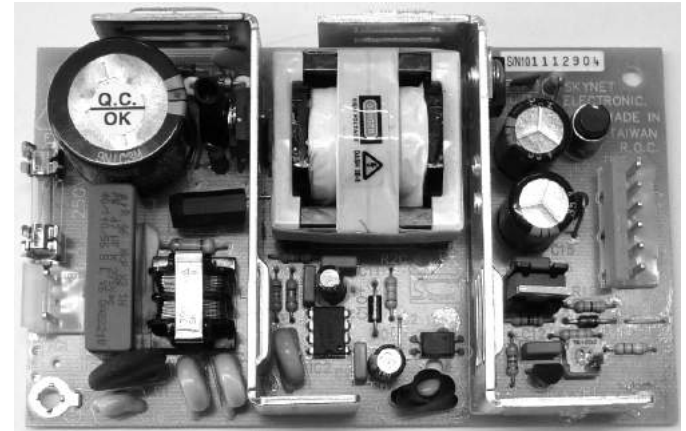

Leben in Bewegung – den Patienten zuliebe



S/N >20000

0.0034.246



0.0000.107

0.0034.260



2.0034.359

2.0037.913




2.0034.085

0.0034.270



2.0034.131

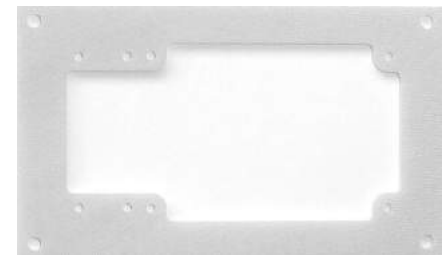

2.0037.004



0.0037.104

S/N 1000 – 19999



2.0037.005



S/N > 20000



2.0037.048



Leben in Bewegung – den Patienten zuliebe




0.0037.026



S/N 1000 - 19999



0.0037.210

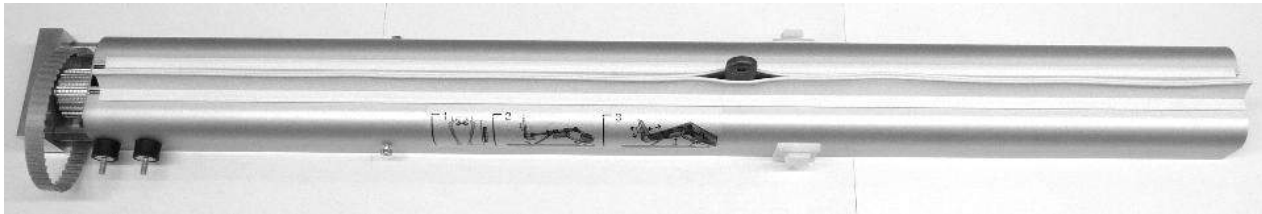

S/N > 20000



0.0037.510

0.0040.025




2.0037.105



0.0037.038




2.0037.241

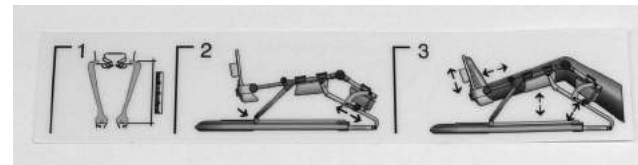

0.0037.039



0.0000.142

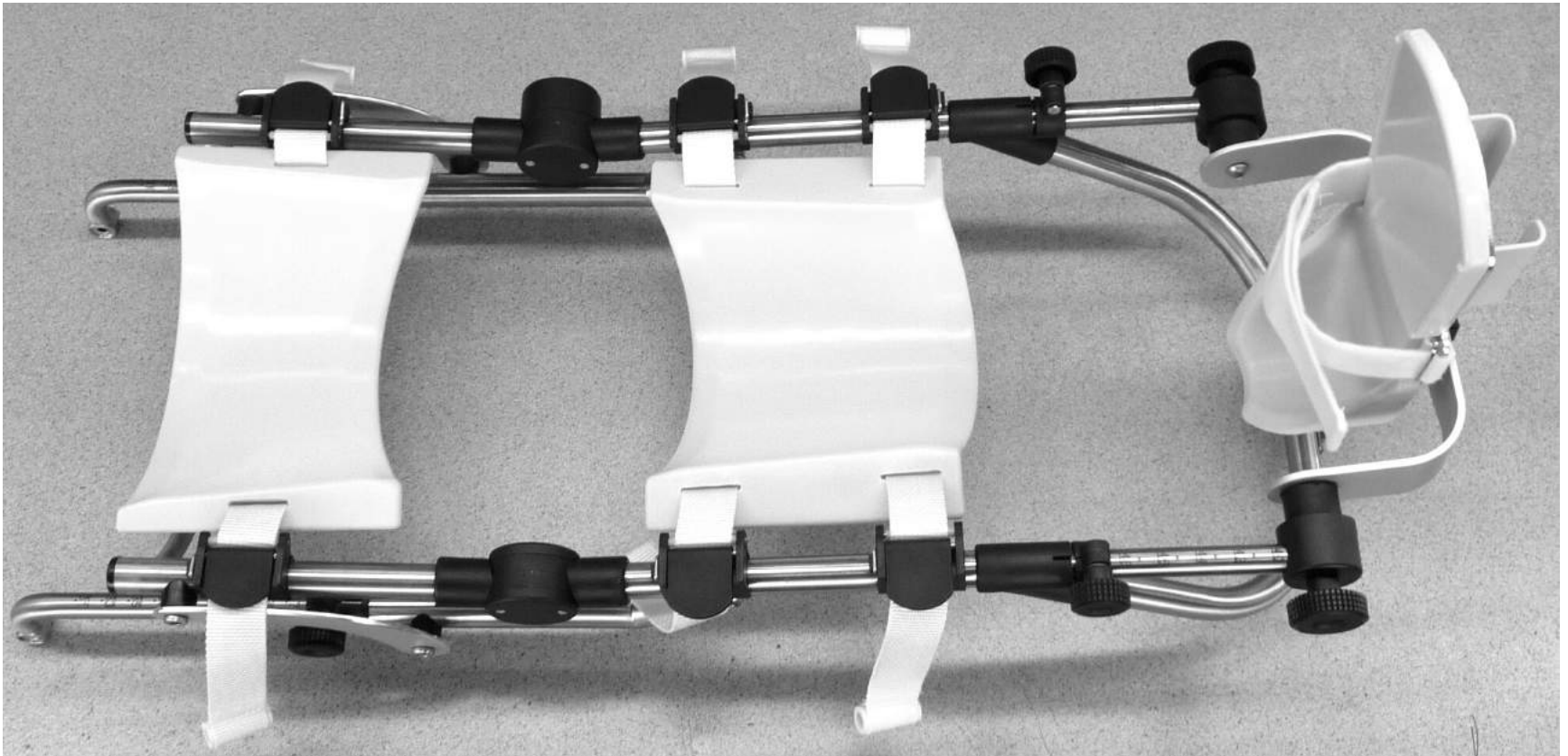


2.0013.073



2.0013.074



2.0013.059

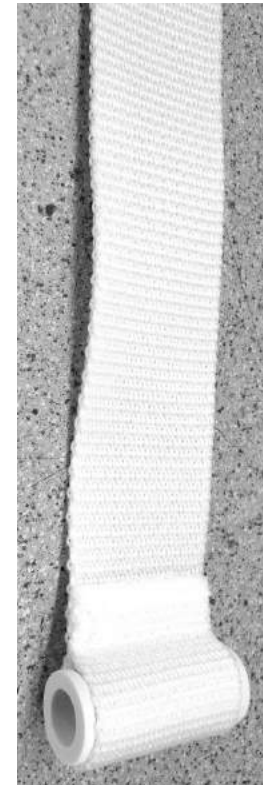

0.0037.082



2.0037.258



0.0037.107



0.0031.122



0.0037.111



0.0037.006




2.0013.338



2.0037.152




2.0037.150

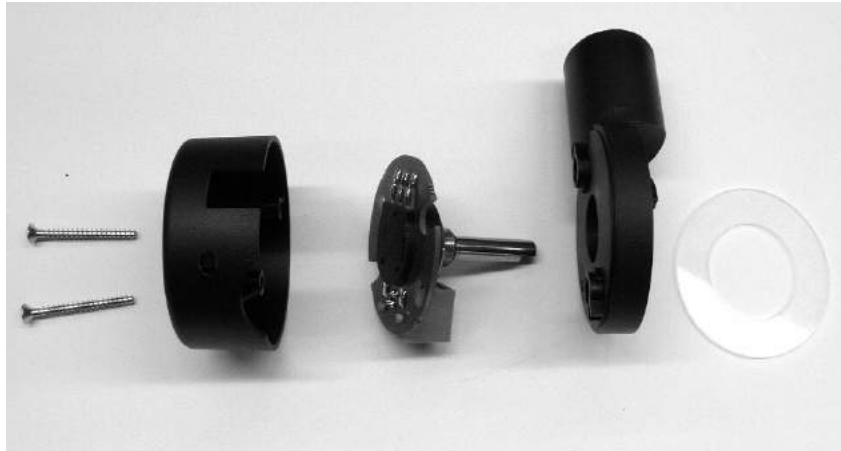

2.0037.150



2.0037.151

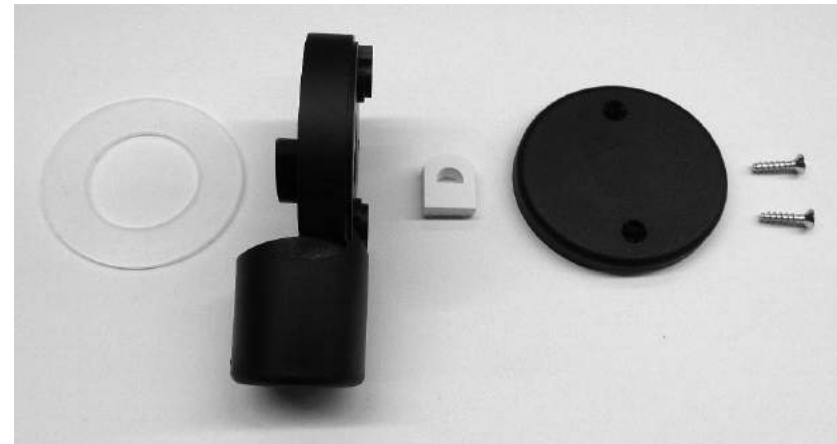

0.0037.023



2.0037.023



2.0037.136



2.0037.141





0.0037.022


0.0037.110



0.0037.079

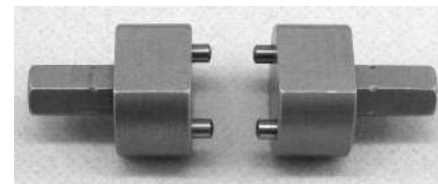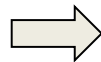

0.0037.003

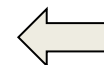

2.0037.151




2.0037.136



2.0037.136



2.0037.151

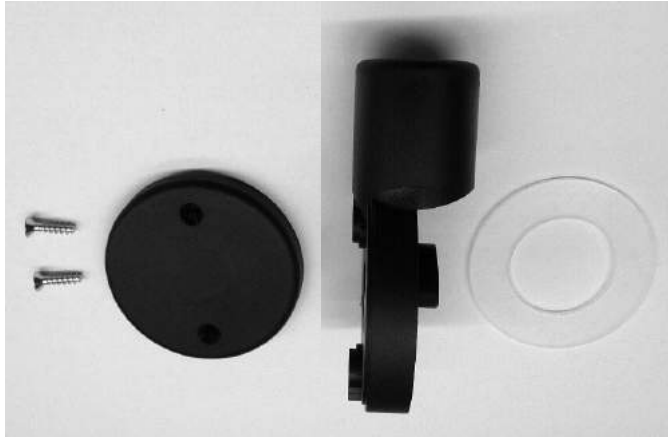

0.0037.022



2.0037.150





2.0037.150




0.0037.022

0.0037.079

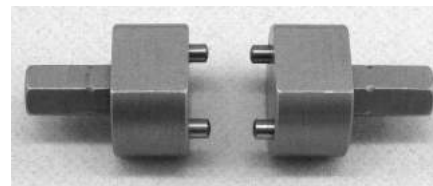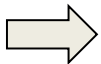

0.0037.003

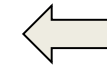

Leben in Bewegung – den Patienten zuliebe





DIN6325D3X30

DIN125D5,3vz

2.0013.087

2.0037.032

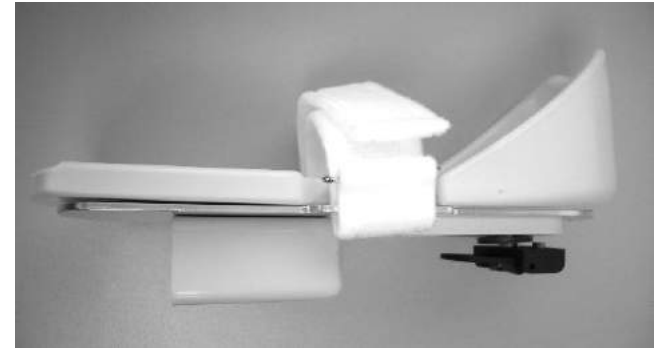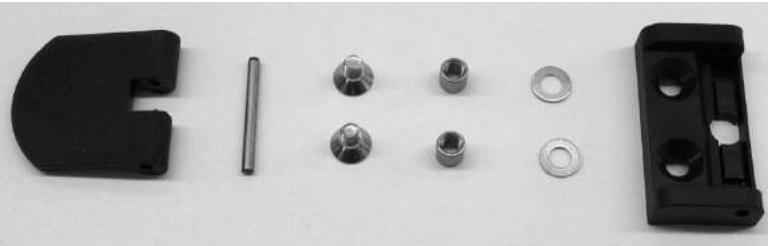

2.0037.204

DIN7991M5X8A2

2.0037.205

2.0038.012

2.0037.196


0.0037.077

2.0037.190

2.0013.301



0.0037.076

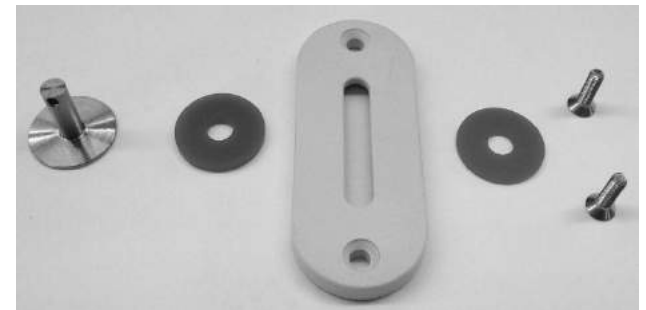

2.0013.303


2.0013.298

DIN7991M5X18A2

2.0037.195



GN534-40-M8SW

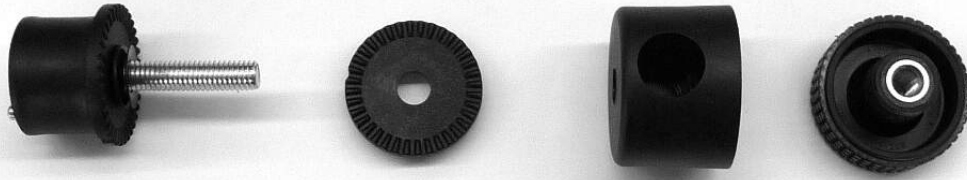

0.0037.202



2.0031.119

0.0037.078



0.0034.118




2.0037.153



0.0037.150



2.0037.243

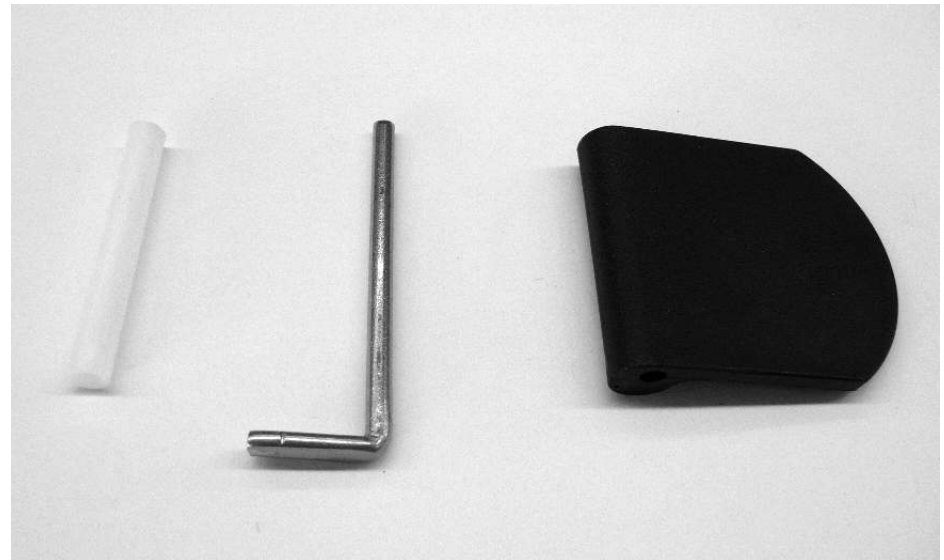

2.0013.314




2.0037.202

0.0037.150



2.0037.243

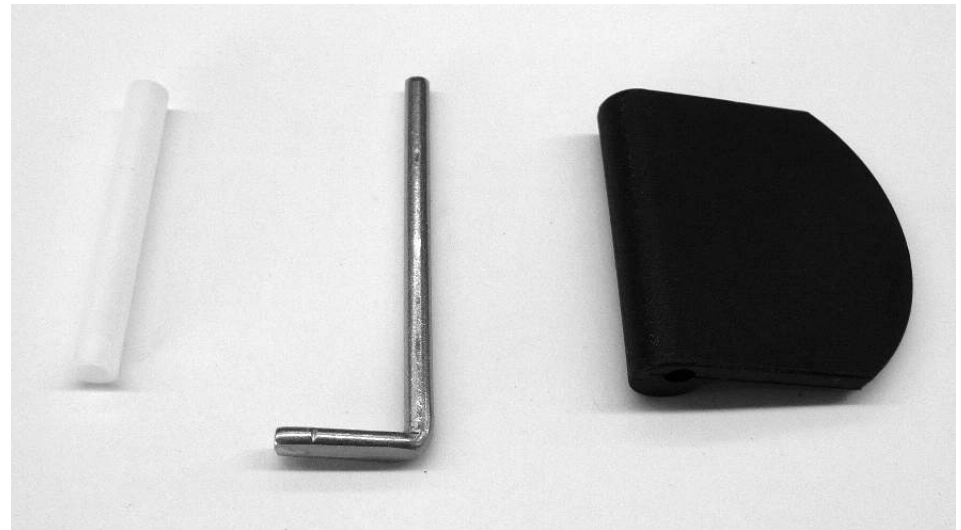

2.0013.314




2.0037.203


0.0037.201



0.0037.207

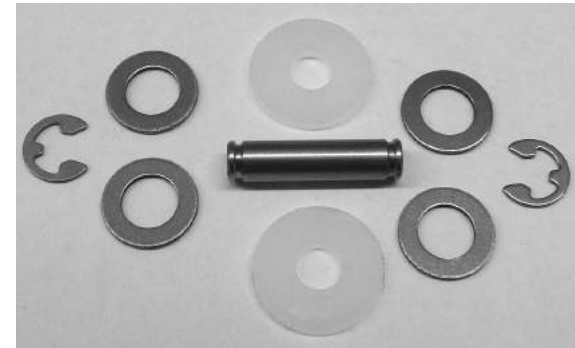

2.0037.121

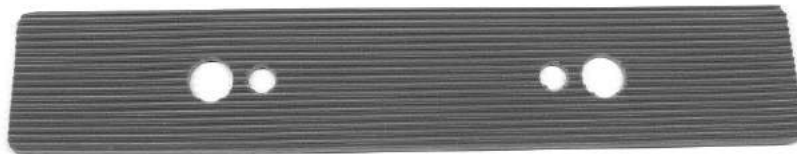

DIN7985M5X12A2



0.0037.017



Leben in Bewegung – den Patienten zuliebe




ARTROMOT K1-Rev8


Leben in Bewegung – den Patienten zuliebe



LEFT: 0.0037.128; RIGHT: 0.0037.129

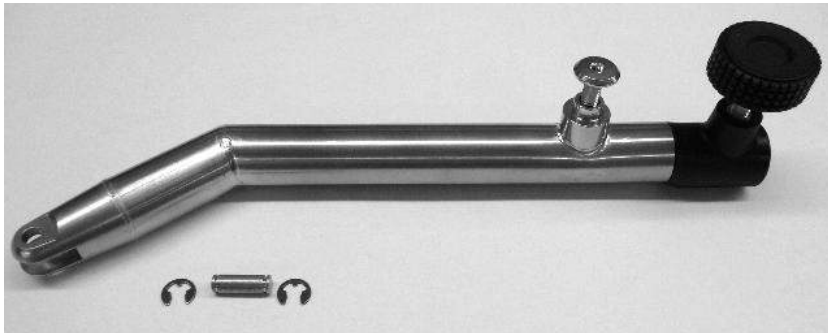

2.0037.047

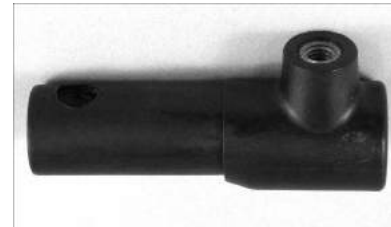

2.0037.173



DIL 6799D5A2

S/N < 13000

0.0037.018



2.0037.139



0.0037.078



2.0037.162

S/N ≥ 13000

0.0040.005



2.0037.118



Leben in Bewegung – den Patienten zuliebe


2.0037.137



959.026



2.0037.009

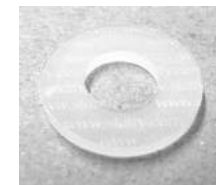

0.0037.037



0.0037.025

ARTROMOT K1-Rev8



| | |
|---------------------|------------|
| STANDARD | 0.0037.050 |
| STANDARD + CHIPCARD | 0.0037.051 |
| COMFORT | 0.0037.054 |
| COMFORT + CHIPCARD | 0.0037.055 |



CLASSIC 0.0037.061



0.0037.103

Leben in Bewegung – den Patienten zuliebe



0.0037.014



0.0000.210




0.0037.043



0.0034.148



0.0037.101

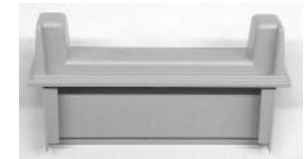

2.0037.169



2.0037.035



0.0031.004



0.0037.100




0.0037.102



Leben in Bewegung – den Patienten zuliebe



2.0037.208

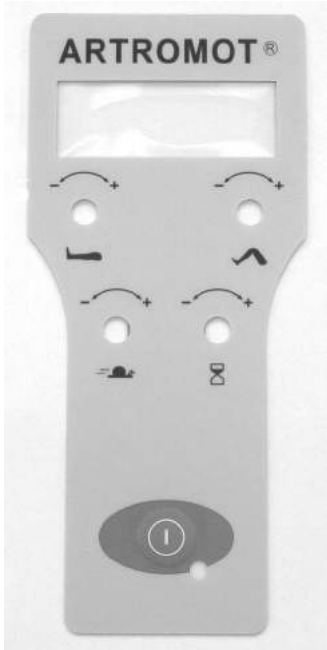

2.0037.215

0.0037.089



958.017



2.0037.035

2.0037.908



0.0031.004

0.0037.044



2.0037.209



0.0037.102

ARTROMOT K1-Rev8

| | | | | | |
|------------|--|------------|--|----------------|---|
| 0.000.105 | Sicherung 1 AT ab Seriennr. 20000 | 0.0037.104 | Gummipuffer Type B15x10 | 2.0037.118 | Kordelgriffschraube ab Seriennummer 13000 |
| 0.0000.005 | Sicherung 1 AT bis Seriennr. 19999 | 0.0037.105 | Zahnriemen K1 | 2.0037.121 | Gummimatte klein |
| 0.0000.107 | Sicherung T 2.0 A UL Listed | 0.0037.107 | Kupplung Spiralkabel | 2.0037.136 | Gleitscheibe |
| 0.0000.142 | Nachfettspritze K1 | 0.0037.110 | Nietensockel K50-27 | 2.0037.137 | Femurmond |
| 0.0000.210 | Handset Graphics Repair | 0.0037.111 | Kabelbinder 100/25 SL-C | 2.0037.139 | Lagerbolzen |
| 0.0031.004 | Halteclip | 0.0037.115 | Stapelpuffer | 2.0037.141 | Drehdämpfer |
| 0.0031.122 | Spiralkabel | 0.0037.128 | K1 OS Rohr links komplett | 2.0037.150 | Drehgelenk |
| 0.0034.048 | Chipkarte K1 | 0.0037.129 | K1 OS Rohr rechts komplett | 2.0037.151 | Deckel Gelenk |
| 0.0034.118 | Netzleitung EU | 0.0037.150 | Gurtführung komplett mit Hackennagel | 2.0037.152 | Deckel Poti |
| 0.0034.244 | Netzteil elektronik bis Seriennr. 19999 | 0.0037.200 | Gehäusedeckel K1 mit Aufkleber | 2.0037.153 | Winkelklemmverbinder |
| 0.0034.245 | Netzschalter Ein/Aus mit Anschlussbuchse bis Seriennr. 19999 | 0.0037.201 | Gehäusedeckel klein | 2.0037.162 | Sattelscheibe |
| 0.0034.246 | Verschlusskappe Sicherung | 0.0037.202 | Gummipuffer kompl. für Sprunggelenksbügel | 2.0037.169 | Acrylglas MINI-TAW |
| 0.0034.260 | Netzschalter Ein/Aus mit Anschlussbuchse ab Seriennr. 20000 | 0.0037.204 | Option: Rahmenabschluss Nachrüstsatz | 2.0037.173 | Lagerbolzen |
| 0.0034.270 | Netzteil elektronik ab Seriennr. 20000 | 0.0037.207 | Bolzen Set Mitnehmer | 2.0037.190 | Friktionsscheibe |
| 0.0037.003 | Montagetool Kniegelenk | 0.0037.210 | Spindel kompl. mit Aluprofil bis S/N 19999 | 2.0037.195 | Zahnscheibe |
| 0.0037.006 | Tülle mit Zugentlastung | 0.0037.222 | Abstanlehre K1 Motor-Aluprof | 2.0037.196 | Gweindebuchse |
| 0.0037.007 | Spiral cable of the Potentiometer | 0.0037.220 | Motor komplett K1 S/N > 6000 | 2.0037.202 | Klemmhebel |
| 0.0037.012 | Zahnriemen K1 | 0.0037.510 | Spindel kompl. Mit Aluprofil ab S/N 20000 | 2.0037.203 | Klemmhebel |
| 0.0037.014 | Folientastatur K1 | 0.0040.005 | Flachkopfschraube RAMP A | 2.0037.204 | Klemmhebel |
| 0.0037.017 | Blindstopfen | 0.0040.025 | Aufkleber "Gebrauchsanleitung" | 2.0037.205 | Aufnahme Exzenterhebel schwarz |
| 0.0037.018 | Clips-Lager | 2.0013.059 | Gurt mit Zuglasche (Oberschenkel) | 2.0037.208 | Folientastatur ARTROMOT-K1 |
| 0.0037.022 | PT Schraube KB30-12 | 2.0013.059 | Gurt mit Zuglasche (Unterschenkel) | 2.0037.209 | Gehäuse Mini Taw |
| 0.0037.023 | PT Schraube K30-30 | 2.0013.073 | Oberschenkelauflage mit Gurt | 2.0037.215 | Acrylglas |
| 0.0037.025 | Schraube DN7984 M6x25A2 | 2.0013.074 | Unterschenkelauflage mit Gurte | 2.0037.241 | Aufkleber Bedienungsanleitung K1 |
| 0.0037.026 | Distanzscheibe D18 | 2.0013.087 | Gurtschlaufe | 2.0037.243 | Hakennagel für K1 ab Seriennummer 4288 |
| 0.0037.036 | Netzleitung Schweiz | 2.0013.291 | Unterschenkelauflage | 2.0037.258 | Spiralkabel K1 Kupplung/Potentiometer |
| 0.0037.037 | Unterlegescheibe 0030608 | 2.0013.294 | Oberschenkelauflage | 2.0037.901 | Motorsteuerung S/N < 6000 |
| 0.0037.038 | Draht für Lippe | 2.0013.298 | Ovale Platte für Blech | 2.0037.908 | Handset K1 Classic Repair |
| 0.0037.039 | Kabelhalter | 2.0013.301 | Friktionsscheibe | 2.0037.913 | EMC Filter |
| 0.0037.041 | Knieelektronik kompl. | 2.0013.303 | Verstellbolzen | 2.0037.921 | Motorsteuerung S/N > 6000 |
| 0.0037.043 | Display HC Graphik komplett | 2.0013.314 | Gurtrolle POM RAL5023 | 2.0038.012 | Fussauflageschale |
| 0.0037.044 | Display K1 Classic komplett | 2.0013.338 | Rundschnur Kupplung | 958.007 | O-Ring OR003, 50x00x90 872 |
| 0.0037.050 | Handbedieneinheit mit Spiralkabel K1 Standard | 2.0013.352 | Stift | 959.026 | Rohrkappe GL schwarz |
| 0.0037.051 | Handbedieneinheit + Spiralkabel K1 Stand. + Chipkarte | 2.0013.352 | Stift | DIN125D5, 3vz | Scheibe DIN125 D5, 3 vz |
| 0.0037.054 | Handbedieneinheit mit Spiralkabel K1 Comfort | 2.0030.100 | K1/K2 Seitenklappe für Transportwagen schwarz | DIN6325D3X30 | Zylinderstift |
| 0.0037.055 | Handbedieneinheit + Spiralkabel K1 Comfort + Chipkarte | 2.0031.119 | Gelenkdose | DIN6799D5A2 | Sicherungsscheibe |
| 0.0037.061 | Handbedieneinheit + Spiralkabel K1 Classic | 2.0034.085 | Drahtsatz EMC-Filter | DIN6799D2,3A2 | Sicherungsscheibe |
| 0.0037.075 | Motor komplett K1 S/N < 6000 | 2.0034.131 | Isolationsrahmen | DIN6799D2,3A2 | Sicherungsscheibe |
| 0.0037.076 | Holder K1 hand held programming unit | 2.0034.358 | Schutzleiter | DIN7985M5X12A2 | Linsschraube |
| 0.0037.077 | Fussplatte mit HC Halter | 2.0034.359 | Drahtsatz Netzeingang | DIN7991M5X18A2 | Senkschraube |
| 0.0037.078 | Kordelgriff komp. bis Seriennr. 13000 | 2.0037.004 | Anschlussbuchse der Handbedieneinheit | DIN7991M5X8A2 | Senkschraube |
| 0.0037.078 | Kordelgriff komplett | 2.0037.005 | Drahtsatz bis Seriennr. 19999 | GN534-40-M8sw | Feststellschraube |
| 0.0037.079 | Gelenkbuchse komplett | 2.0037.009 | Femurbogen | | |
| 0.0037.082 | Spiralkabel Poti Umbaukit | 2.0037.023 | Knieelektronik K1 | | |
| 0.0037.089 | Drehkopf K1 Classic | 2.0037.032 | Fussauflageschale kompl. mit Blech, Klemmhebel, Gurt | | |
| 0.0037.099 | Protokoll Chipkarte | 2.0037.035 | Spiralkabel Handbedieneinheit | | |
| 0.0037.100 | Gehäuse MINI-AW UL94 V0 | 2.0037.047 | Femurklemme | | |
| 0.0037.101 | Kartenführung Lichtgrau | 2.0037.048 | Drahtsatz ab Seriennr. 20000 | | |
| 0.0037.102 | Deckel Stinseite | 2.0037.105 | Lippe / Gummilippe | | |
| 0.0037.103 | Protection for hand held programming unit | 2.0037.111 | Gummimatte gross | | |

Bestellungen unter:
WINTER Medizintechnik AG
 Oberdorfstrasse 68, 9100 Herisau
 Tel: 071 761 01 02
 E-Mail: info@wintermed.ch
www.wintermed.ch